




1

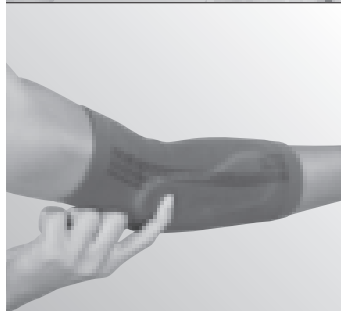

2

protect.Epi

Назначение

protect.Epi представляет собой локтевой бандаж. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения локтевого сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже

Показания

- медиальный и латеральный эпикондилиты («локоть теннисиста», «локоть игрока в гольф»)
- травмы локтевого сустава
- синовит и отек при артрозах и артритах
- воспаление сухожилий

Противопоказания

Заболевания или травмы кожи в области контакта с изделием. Нарушения чувствительности, кровообращения или лимфатического оттока в области верхних конечностей.

Принцип действия

Компрессионная ткань массирует область сустава, улучшая кровообращение и ускоряя рассасывание отека и гематом. Бандаж улучшает проприоцептивную чувствительность, за счет чего усиливается мышечная поддержка и стабилизируется локтевой сустав.

Рекомендации по применению

Для максимального лечебного эффекта бандаж следует носить регулярно в течение всего дня. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

Рекомендации по надеванию (рис.

- Возьмите бандаж за верхний край и наденьте так, чтобы локтевой сустав

оказался в средней части изделия (рис. 1).

- Бандаж надеть правильно, если внутренние и наружные костные выступы (надмышелки) прощупываются через отверстия в эластичных вкладышах (рис. 2).

В первый раз бандаж следует надевать после инструктаж, проведенного обученным специалистом.

Рекомендации по уходу

Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиамид, эластан, полиэстер

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.